

生体電気インピーダンス（BIA）法による口腔粘膜の水分測定器

口腔水分計ムーカス®

ORAL MOISTURE CHECKER MUCUS®

～わずか2秒の簡単測定～

判定の目安

	数 値	インジケータ
正常	30.0 以上	
	29.6 ~ 29.9	
境界域	28.0 ~ 29.5	
乾燥	25.0 ~ 27.9	
	24.9 以下	

*測定値28～29.5を境界域とし、28未満の場合は、口腔内が乾燥状態であることが疑われます。
既存検査法、他覚所見、自覚症状、VASなどと併せた診断が必要です。

(埼玉医科大学を中心とした多施設共同研究による)

*表示される数値は、相対値のため単位はありません。